

ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-24 ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-24 ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-24 ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-24 ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-24

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ


ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-24 ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-24 ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-24 ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-24 ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-24



**ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ**

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ


ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-24 (КАТ.№ P-1441) - набор реагентов одноразового использования предназначен для идентификации до вида наиболее важных представителей семейства *Enterobacteriaceae* без постановки дополнительных тестов.

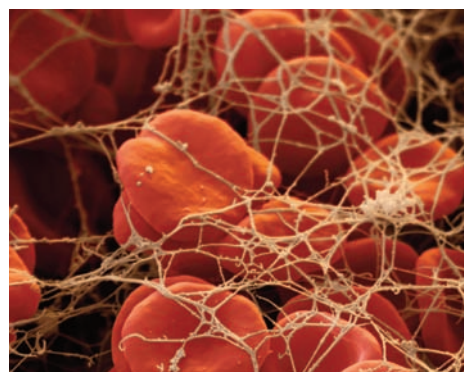

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стандартизует процесс идентификации энтеробактерий
- Обеспечивает надежность идентификации
- Сокращает сроки исследования и трудозатраты
- Обеспечивает комфорт в работе
- Долговечность в сравнении с классическими пробирочными средами (срок годности 1 год)
- Использование полистироловых 96-ти луночных планшетов с цветными вертикальными разборными стрипами с сухими субстратно-индикаторными средами с возможностью исследования по одной культуре. Набор рассчитан на 24 анализа
- Удобная комплектация набора, включающая готовые к немедленному использованию физиологический раствор для приготовления микробной суспензии, дополнительные реагенты и вазелиновое масло
- Стабильность после вскрытия стрипов со средами, физ. раствора, дополнительных реагентов до конца срока годности набора
- Наличие цветового указателя, флаконов-капельниц для реактивов и крышки-капельницы для масла
- Наличие ссылки в инструкции по применению на использование контрольных штаммов для контроля специфической активности набора
- Унификация процесса интерпретации результатов с помощью каталога кодов и Программного обеспечения
- Возможность автоматического учета результатов и идентификации. Набор адаптирован и может использоваться в программах «Микроб-Автомат», «Микроб-2» и фотометрах типа IEMS-reader, Multiscan Ascent, Thermo-Fischer Scientific


СХЕМА БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-24

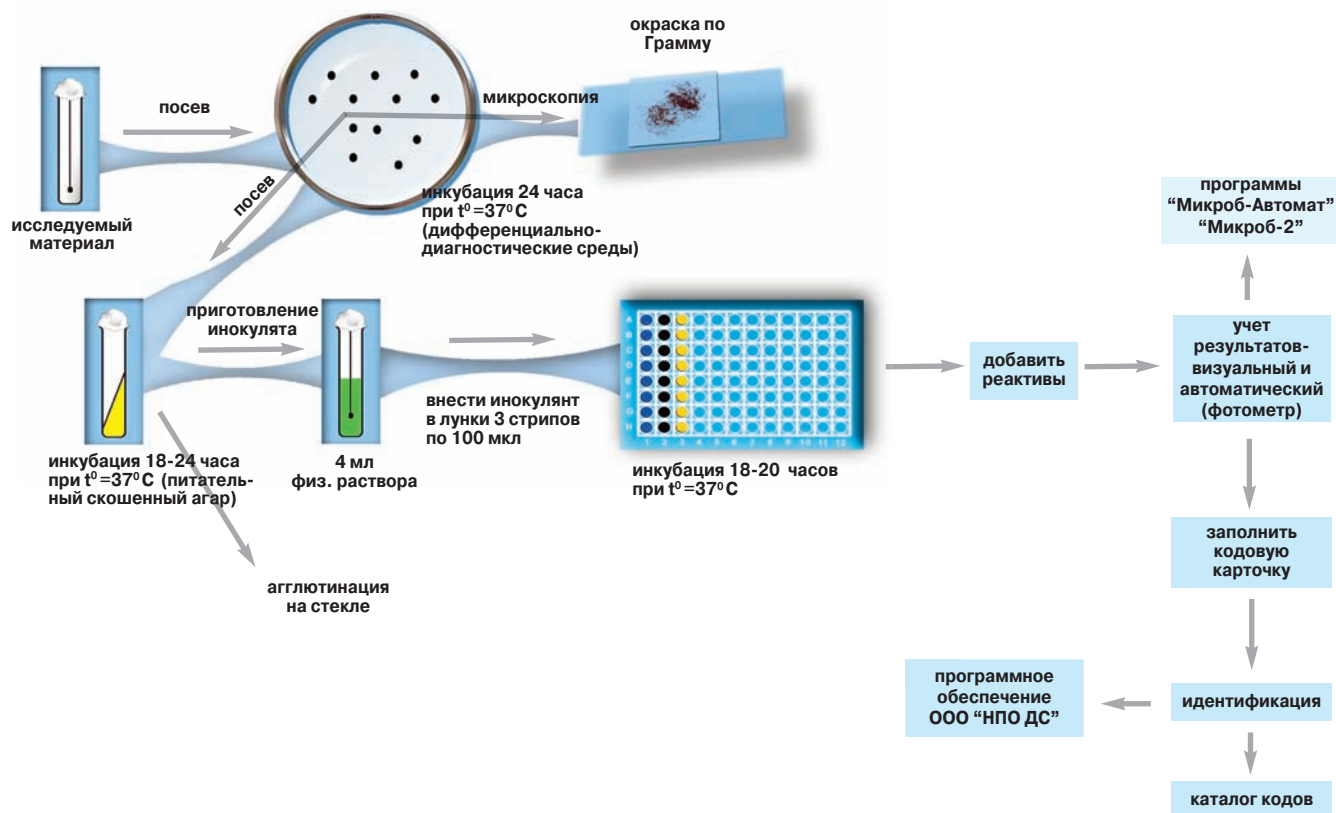

ЦВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ

НАБОР СОДЕРЖИТ 24 ТЕСТА

		A	B	C	D	E	F	G	H
1	тест	Цитрат натрия	Малонат натрия	Эскулин	Лизин	Аргинин	Орнитин	Сероводород	Фенилаланин
	+								
	-								
2		A	B	C	D	E	F	G	H
	тест	АМК	Индол	Глюкоза	β-галакт	Лактоза	Маннит	Сахароза	Инозит
	+								
-									
3		A	B	C	D	E	F	G	H
	тест	Сорбит	Арабиноза	Мальтоза	Адонит	Трегалоза	Рамноза	Дульцит	Мочевина
	+								
-									



Департамент продаж:
603001 Н. Новгород, ул. Нижне-Волжская наб., 9
Тел./факс: (831) 467-82-02, 467-82-15,
467-82-16, 467-82-17
Бесплатная линия 8-800-555-0300
E-mail: selling@npods.ru
www.npods.ru