

ДС-ДИФ-НЕФЕРМ ДС-ДИФ-НЕФЕРМ ДС-ДИФ-НЕФЕРМ ДС-ДИФ-НЕФЕРМ ДС-ДИФ-НЕФЕРМ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕФЕРМЕНТИРУЮЩИХ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ

ДС-ДИФ-НЕФЕРМ ДС-ДИФ-НЕФЕРМ ДС-ДИФ-НЕФЕРМ ДС-ДИФ-НЕФЕРМ ДС-ДИФ-НЕФЕРМ



**ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ**

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕФЕРМЕНТИРУЮЩИХ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ


ДС-ДИФ-НЕФЕРМ (КАТ. № PN-732) - набор реагентов одноразового использования предназначен для идентификации и дифференциации до вида по 24-м биохимическим признакам группы грамотрицательных неферментирующих бактерий, выделяемых в ходе бактериологического анализа.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает надежность идентификации
- Сокращает сроки исследования и трудозатраты
- Обеспечивает комфорт в работе
- Долговечность в сравнении с классическими пробирочными средами (срок годности 1 год)
- Использование стрипированных полистироловых 96-ти луночных планшетов с цветными вертикальными разборными стрипами с сухими субстратно-индикаторными средами с возможностью исследования по одной культуре . Набор рассчитан на 24 анализа
- Удобная комплектация набора, включающая готовые к немедленному использованию физиологический раствор для приготовления микробной суспензии, дополнительные реагенты для тестов индол, нитраты и нитриты, и вазелиновое масло
- Температура инкубации теста 30 ° C
- Время инкубации 48 часов
- Стабильность после вскрытия физ.раствора, дополнительных реагентов до конца срока годности набора
- Наличие цветового указателя, флаконов-капельниц для реактивов и крышки-капельницы для масла
- Наличие ссылки в инструкции по применению на использование контрольных штаммов для контроля специфической активности набора
- Унификация процесса интерпретации результатов с помощью каталога кодов и Программного обеспечения

СХЕМА БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДС-ДИФ-НЕФЕРМ

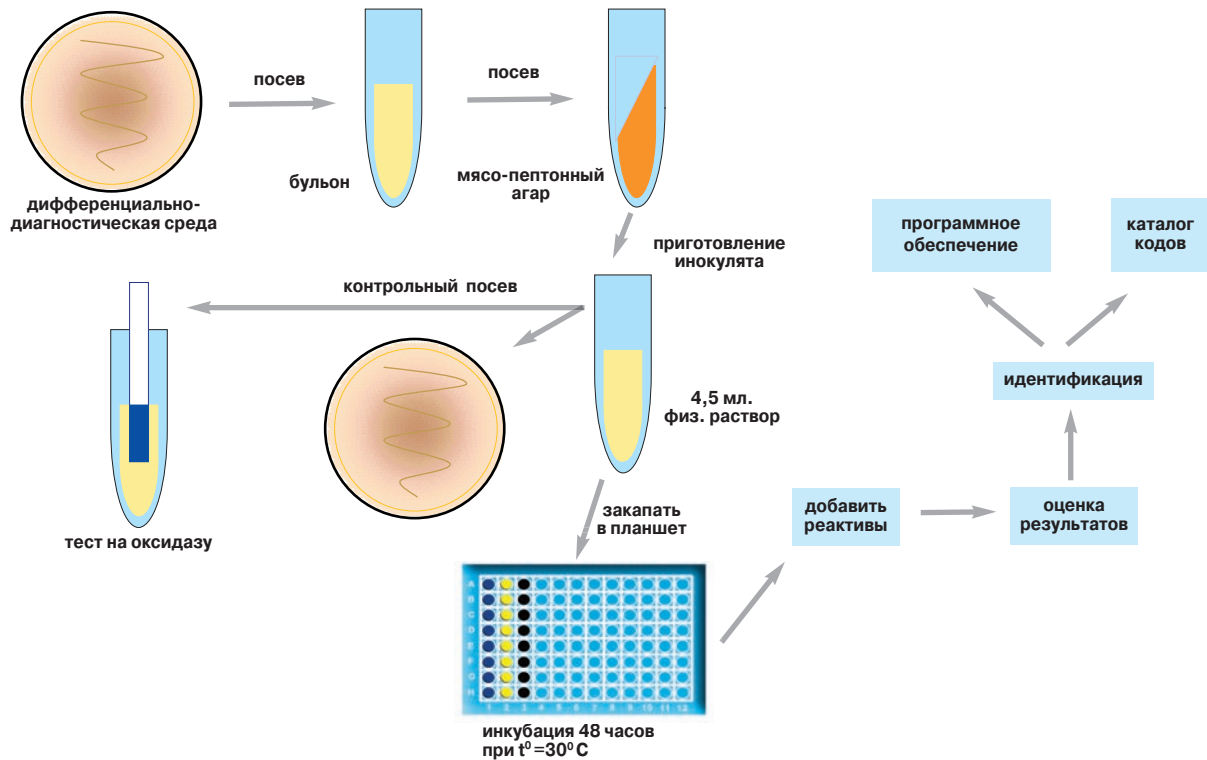

ЦВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ

НАБОР СОДЕРЖИТ 24 ТЕСТА

		A	B	C	D	E	F	G	H
1	тест	Сахароза	Инозитол	Фруктоза	Глюкоза	Лизин	Уреаза	Аргинин	Индол
	+								
	-								
		A	B	C	D	E	F	G	H
2	тест	Галактоза	Целлобиоза	Ксилоза	Маннитол	NAG	β -глюк	β -галакт	Фосфатаза
	+								
	-								
		A	B	C	D	E	F	G	H
3	тест	Цитрат Симмонса	Трегалоза	Мальтоза	Лактоза	γ -глют	Эскулин	Нитриты	Нитраты
	+								
	-								



Департамент продаж:

603001 Н. Новгород, ул. Максима Горького, 195
Тел./факс: (831) 467-82-02, 467-82-15,
467-82-16, 467-82-17
Бесплатная линия 8-800-555-0300
E-mail: selling@npods.ru
www.npods.ru